



## Masque chirurgical

### MATERIAU

- Polypropylène non-tissé 25 g/m<sup>2</sup> ± 10%, 3 plis
- 2 élastiques en polyester recyclé
- Barrette nasale d'ajustement
- Filtration haute performance
- Hypoallergénique, doux et confortable
- Taille unique

### DIMENSIONS

- 18 x 9,5 cm

### REGLEMENTATION

- Conforme aux exigences de la Directive 93/42/CEE
- Norme EN14683 Type IIR

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Avant de mettre le masque, les mains doivent être lavées avec un gel hydroalcoolique ou de l'eau et du savon
- Placer les élastiques autour des oreilles. Couvrir la bouche et le nez avec le masque.
- Ajuster le masque avec la barrette nasale pour l'adapter au visage.
- Laisser le moins d'espace possible entre le masque et le visage
- Éviter de toucher le masque lors de son utilisation
- Remplacer le masque lorsqu'il devient humide
- Jeter le masque après usage.

### STOCKAGE

- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

### CONDITIONNEMENT

- Boîte distributrice de 50 masques.
- Carton de 2 000.



(\*) photo non contractuelle. Le boitage pourra changer en fonction des évolutions de la réglementation.